

TELUGU

Tina™  
hCG

CE

ఒక్క స్టెప్ గర్భధారణ పరీక్ష

ముందస్తుగా గుర్తించడం కొరకు సరళమైన ఇంటిలో ఉపయోగించే టెస్ట్  
ఇన్‌విట్రో డయగ్నోస్టిక్ ఉపయోగం కొరకు మాత్రమే

మీరు టెస్ట్ ప్రారంభించడానికి మందు

- దయచేసి సూచనలను జాగ్రత్తగా చదవండి మరియు మీరు టెస్ట్ చేయానికి సిద్ధంగా ఉన్నంత వరకు ప్యాన్లో ఉండి ఫాయిల్‌ని తరవవద్దు.
- దయచేసి కళ్ళి మరియు పరిశుభ్రమైన డ్రై కంటినర్‌ని సిద్ధంగా ఉంచుకోండి

టెస్ట్ చేయడం


దశ 1

చిన్న కంటినర్‌లో మూత్రాన్ని సేకరించండి.




దశ 3

శాంపుల్ డ్రాపర్‌తో మూత్ర నమూనా సేకరించండి

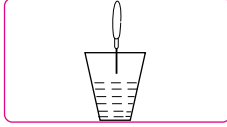


దశ 2

Tina HCG ప్యాన్‌ని కట్ చేసి తరవండి, టెస్ట్ పరికరాన్ని  
(1) & శాంపుల్ డ్రాపర్ (2) తొలగించండి

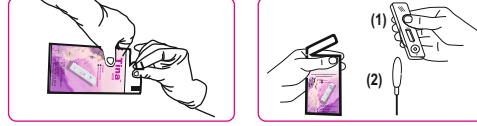

దశ 4

డ్రాపర్‌తో 2 చుక్కలను 5 వలే మార్క్ చేయబడ్డ శాంపుల్ పోర్ట్‌పై విడిచిపెట్టండి

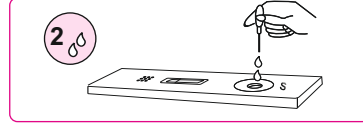

టెస్ట్ ఫలితాల కొరకు వేచి ఉండండి

పింక్ లైన్లు కనిపించడం ప్రారంభం అవుతుంది... ఫలితాలను చదవడానికి 5 నిమిషాలు వేచి ఉండండి



ఫలితాలు చదవండి

పాజిటివ్



ఒకే వేళ మీరు 2 పింక్ కలర్ లైన్లు చూసినట్లయితే, మీకు పాజిటివ్ లైన్లు ఎంత ముదురుగా లేదా తేలికగా ఉన్నాయోనది సంబంధం లేదు. మరింత సమాచారం కొరకు తరువాత పేజీలోని Q2ని చదవండి

నెగిటివ్




'C' ప్రాంతంలో కేవలం ఒక్క పింక్ కలర్ లైన్లు మాత్రమే ఉంది మరియు సమాచారం కొరకు తరువాత పేజీలోని Q3ని చదవండి

## ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు

- Q1 సేను ఎంత ముందుగా టెస్ట్ చేయవచ్చు?**  
 మీకు పీరియడ్ తప్పిపోవడానికి ముందు 6 రోజుల నుంచి మీరు టెస్ట్ చేయవచ్చు (మీరు మీ పీరియడ్స్ ఆశించే రోజుకు 5 రోజుల ముందు) ఒకవేళ మీకు ముందస్తుగా పరీక్షించడం వల్ల నెగిటివ్ (గర్భం రాకపోవడం) ఫలితం కావచ్చు, అయితే మీరు గర్భం ధరించే అవకాశం ఇంకా ఉండవచ్చు. మరింత సమాచారం కొరకు Q3 చూడండి.
- Q2 నా ఫలితం పాజిటివ్ సేను ఏమి చేయాలి?**  
 మీ గర్భధారణ గురించి, మీరు ఎటువంటి చర్యలు మరియు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనే దానిని చర్చించడానికి మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి మీ మరియు మీ బిడ్డ ఆరోగ్యాన్ని దృవీకరించడం కొరకు ముందస్తు గర్భధారణ సంరక్షణ చాలా ముఖ్యం అని గుర్తుంచుకోండి.
- Q3 నా ఫలితం నెగిటివ్ దీని అర్థం ఏమిటి?**  
 మీ పరీక్ష నెగిటివ్ ఫలితాన్ని చూపించినట్లయితే, మీ మూత్రంలో ఎలాంటి గర్భధారణ హార్మోన్ (HCG) గుర్తించబడలేదు. మీరు గర్భవతి కాకపోవచ్చు లేదా మీరు మీ రుతుచక్రం, గర్భధారణను తప్పుగా తెక్కించి ఉండవచ్చు హార్మోన్ లెవల్ గుర్తించడానికి తగినంత ఎక్కువగా ఉండకపోవచ్చు. మీకు ఫలితం గురించి ఖచ్చితంగా తెలియనట్లయితే, రుతుచక్రం తప్పిపోయిన మొదటి వారంలోగా మీరు తిరిగి టెస్ట్ చేయవచ్చు. మీకు ఇంకా నెగిటివ్ ఫలితం ఉండి, మీకు రుతుచక్రం ప్రారంభం కానట్లయితే, మీకు రుతుసరి రాకపోవడానికి ఇతర కారణాలు ఉండవచ్చు కనుక మీ వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.
- Q4 టెస్ట్ ఎలా పనిచేస్తుంది?**  
 ఇది మీ మూత్రంలో చిన్నమొత్తంలో ఉండి గర్భధారణ హార్మోన్ HCG (హ్యూమన్ కొరియానిక్ గోనాడోట్రోఫిన్)ని సైతం గుర్తిస్తుంది. గర్భధారణ మొదటి త్రైమాసికంలో HCG ఎక్కువ మొత్తంలో ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది.
- Q5 సేను నా ఫలితాన్ని ఎప్పుడు చదవాలి?**  
 5 నిమిషాల పేచి ఉన్న తరువాత సాధ్యమైన వరకు వెంటనే టెస్ట్ ఫలితాన్ని చదవాలి. 5 నిమిషాల తరువాత టెస్ట్ ఫలితాలు చదవరాదు
- Q6 మధ్యం తాగడం లేదా నోటి ద్వారా తీసుకున్న గర్భనిరోధకాలను ఉపయోగించడం వల్ల పరీక్ష ఫలితాలు ప్రభావితం అవుతాయా?**  
 మధ్యం తాగడం వల్ల మీ టెస్ట్ ఫలితాలు ప్రభావితం కావు నోటి ద్వారా తీసుకునే గర్భనిరోధకాలు, వెయిస్ కిల్లర్లు, యాంటీబయోటిక్స్ లేదా హార్మోన్ థెరపీలు టెస్ట్ ఫలితాలను ప్రభావితం చేయవు మీ ఔషధాల్లో HCG ఉన్నట్లుగా మీకు స్పష్టంగా తెలియనట్లయితే మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి.
- Q7 సేను తాగే నీరు ఫలితాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందా?**  
 నీటితో సహా అధికంగా ద్రవం తీసుకోవడం వల్ల మీ మూత్రం పలుచన అవుతుంది, దీని వల్ల ప్రస్తుతం ఉన్న తలతల మొత్తం సరిగ్గా గుర్తించబడదు.
- టెస్టింగ్ కు ముందు మీరు ఎక్కువగా నీరు తాగరాదు.  
 టెస్టింగ్ కు ఉదయంపూట మూత్రం సిఫారసు చేయబడుతుంది.

● **ముందస్తు జాగ్రత్తలు:**  
 పరికరాన్ని విచ్చదీయవద్దు.  
 ఈ పరికరం యొక్క ఏదైనా కాంపోనెంట్ ని తినవద్దు, ఒకవేళ ప్రమాదవశాత్తు తిన్నట్లయితే, వైద్య సాయం పొందండి.  
 గడువు తేదీ దాటిన తరువాత టెస్ట్ ని ఉపయోగించవద్దు.  
 పిల్లలకు అందుకుండా ఉంచండి.  
 పౌచ్ పాడైపోయినట్లయితే టెస్ట్ పరికరాన్ని ఉపయోగించవద్దు.  
 మీ టెస్ట్ ఫలితాలకు సంబంధించి మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి.

● **టెస్ట్ దోషాలు:** చెల్లుబాటుకాని ఫలితం  
 టెస్టింగ్ చేసిన 5 నిమిషాల్లోపు ఫలిత విండోలో 'T' లైను కనిపించినప్పటికీ 'C' లైను కనిపించకపోతే, టెస్ట్ పనిచేయలేదు.  
 కొత్త Tina HCG పరికరం ఉపయోగించి మళ్ళీ టెస్ట్ చేయండి.

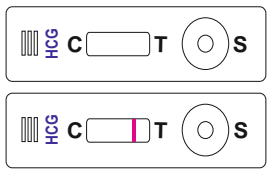

0832/VER-01